

# PLATFORM SWITCHING MIT DEN NEUEN **SCREW-LINE** IMPLANTATEN



Optimiertes Implantatdesign  
Option Platform Switching  
Preisgarantie bis Ende 2010

# DIE NEUEN SCREW-LINE IMPLANTATE

SCREW-LINE Implantate stellen in ihrer Geometrie konische Schraubenimplantate dar und sind mit Promote® (1,4 mm maschinierter Implantatthals) und Promote® plus-Oberfläche (0,4 mm maschinierter Implantatthals) erhältlich.

## Das Sortiment umfasst folgende Implantat Typen

Durchmesser	Länge
3,3 mm	11, 13, 16 mm
3,8 mm	9, 11, 13, 16 mm
4,3 mm	9, 11, 13, 16 mm
5,0 mm	9, 11, 13, 16 mm
6,0 mm	9, 11, 13, 16 mm

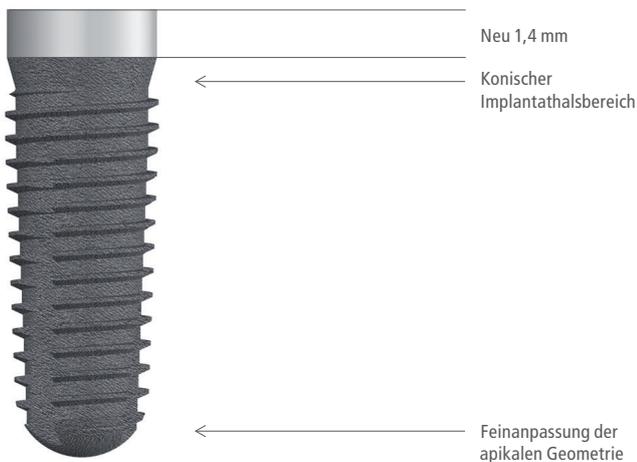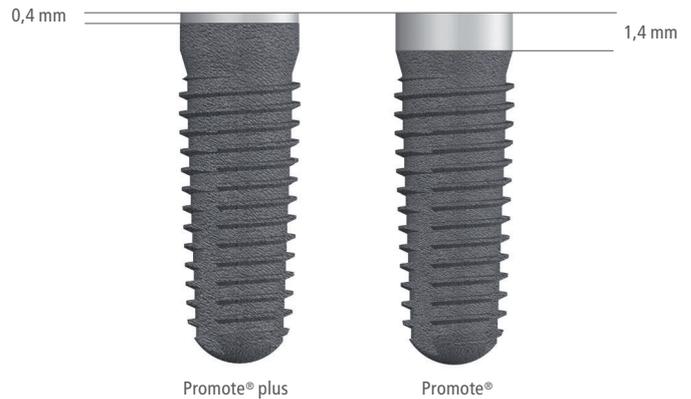

SCREW-LINE Implantat Promote®

## ANPASSUNG DES IMPLANTATHALSBEREICHS DER SCREW-LINE IMPLANTATE

Der konische Implantatthalsbereich der SCREW-LINE Implantate wurde in Richtung Implantatschulter höher gezogen. Dies bewirkt eine Verlängerung der Promote® Oberfläche beim SCREW-LINE Implantat Promote® und eine Vergrößerung des vertikalen Kontakts zwischen Promote® Oberfläche und Knochen. Der zylindrische, maschinerte Implantatthals beträgt bei der Promote®-Oberfläche daher nur noch 1,4 mm.

## FEINANPASSUNG DER APIKALEN GEOMETRIE

Die Feinanpassung der apikalen Geometrie (Verrundung) ermöglicht ein noch schonenderes Einsetzen der SCREW-LINE Implantate in den Knochen.

## HINWEISE

- Die bestehenden chirurgischen SCREW-LINE Instrumente sind ohne Einschränkungen für die neuen SCREW-LINE Implantate der K-Serie verwendbar.
- Die neuen SCREW-LINE Implantate mit K-Artikelnummer sind mit allen Abutmenttypen (inkl. PS) mit K-Artikelnummer (K-Serie) versorgbar.
- Die neuen SCREW-LINE Implantate mit K-Artikelnummer können aufgrund der verkürzten Nuten nicht mehr mit herkömmlichen Abutments (lange Nocken) mit J-Artikelnummer versorgt und mit Abformpfosten mit J-Artikelnummer abgeformt werden.


## PREISGARANTIE

Bis Ende 2010 garantieren wir Ihnen in Deutschland einen stabilen Implantatpreis von € 154.– (zzgl. MwSt) pro Implantat.

# DIE OPTION PLATFORM SWITCHING MIT DEN NEUEN SCREW-LINE IMPLANTATEN

Um den CAMLOG Anwendern die Option des Platform Switching zu ermöglichen, wurden die Implantate der SCREW-LINE (Promote® und Promote® plus) in der Geometrie optimiert. Die drei Nuten der Tube-in-Tube™ Innenkonfiguration wurden von rund auf eckig geändert und verkürzt (K-Serie).

Die neuen Gingivaformer PS, Abformpfosten PS (offener und geschlossener Löffel) und Abutments PS sind ausschließlich mit den neuen SCREW-LINE Implantaten mit K-Artikelnummern verwendbar. Nur mit diesen Komponenten ist die Option des Platform Switching mit dem CAMLOG® Implantatsystem möglich!

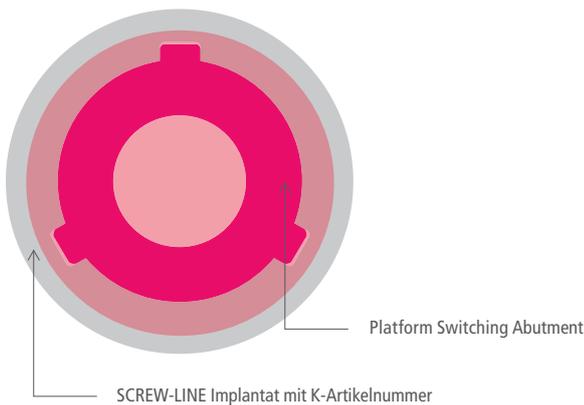

## Distanzen Platform Switching

Implantat-durchmesser	Radial
3,8 mm	0,3 mm
4,3 mm	0,3 mm
5,0 mm	0,35 mm
6,0 mm	0,5 mm

## PROTHETIKKOMPONENTEN FÜR PLATFORM SWITCHING MIT SCREW-LINE IMPLANTATEN


### Neue Gingivaformer PS für Platform Switching

Die neuen Gingivaformer PS (zylindrisch, wide body, bottleneck) sind im Bereich der Implantatschulerauflage im Durchmesser verjüngt.




### Neue Abformpfosten PS, offener und geschlossener Löffel, für Platform Switching

Die Verwendung der neuen Gingivaformer PS bedingt die Verwendung der neuen Abformpfosten PS.

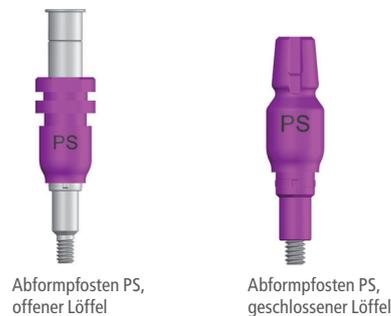

### Neue Provisorische Abutments PS, Esthomic® Abutments PS und Universal-Abutments PS für Platform Switching

Die neuen Abutments PS sind ebenfalls im Bereich der Implantatschulerauflage im Durchmesser verjüngt und ermöglichen so eine horizontale Adaption des Weichgewebes über die Implantatschulter.

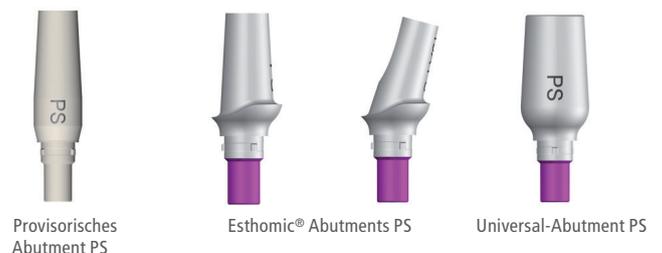

## HINWEISE

- Alle Prothetikkomponenten für Platform Switching sind mit PS gekennzeichnet und mit K-Artikelnummern (K-Serie) versehen.
- Werden zur Einheilung Gingivaformer PS verwendet, muss zur Vermeidung von Gewebeerletzungen die weitere prothetische Versorgung, inkl. Abformung, mit Prothetikkomponenten PS für Platform Switching erfolgen!

#### **DEUTSCHLAND**

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstraße 5 | D - 71299 Wimsheim  
info.de@camlog.com | www.camlog.de

KUNDEN-SERVICE

Telefon +49 70 44 94 45-100 | Fax +49 800 94 45-000

#### **SCHWEIZ**

CAMLOG Schweiz AG | Margarethenstrasse 38 | CH - 4053 Basel  
Telefon +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | vertrieb@camlog.ch | www.camlog.com

#### **ÖSTERREICH**

ALLTEC Dental-GmbH | Schwefel 93 | A - 6850 Dornbirn  
Telefon +43 5572 37 23 41 | Fax +43 5572 372341 404 | info@alltec.at | www.alltec.at

#### **HEADQUARTERS**

CAMLOG Biotechnologies AG | Margarethenstrasse 38 | CH - 4053 Basel | Switzerland  
info@camlog.com | www.camlog.com

Hersteller: ALTATEC GmbH, Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim

**camlog**